

Was kommt als Nächstes?

Geräteleuchten



ROT: Batterie Leer



GRÜN/ROT
BLINKEND: Lädt



GRÜN: Batterie
voll aufgeladen



LILA: Nicht mit
App verbunden



BLUE: Mit App
verbunden

GRÜN/NORMALER
WERT

ORANGE/ERHÖHTER
WERT

ROT/HOHER
WERT



Überprüfe den
Grenzpuls

Auf Anzeichen für Hufrehe überprüfen



Reluctance to turn



Change in behaviour
/ temperament



A shortened stride
/ a stiffened gait



Reluctant to pick
up their feet



Shifting weight
from foot to foot



Abnormal heat at the
hoof wall or coronet



Being careful on
hard or stony ground /
preferring to walk
on soft ground



A strong pounding
digital pulse

The British Horse Society is a Registered Charity Nos. 210504 and 5038516

Grüne Anzeige +
Kein Pulsschlag

Grüne Anzeige
+ schneller Puls

Orange
Anzeige

Orange
Anzeige +
Symptom

Rote Anzeige



Achte auf andere
Symptome

Tierarzt
konsultieren

Überwacht
täglich

Tierarzt
Konsult.

Tierarzt
konsultieren